




# SISTEMA DI RILASCIO PRECARICATO AUTOMATIZZATO CLAREON® AUTONOME®

## Pronto all'uso in 3 semplici step<sup>\*,1</sup>


**STEP 1:**  
Riempire con  
materiale  
viscoelastico  
(~0,28 mL)

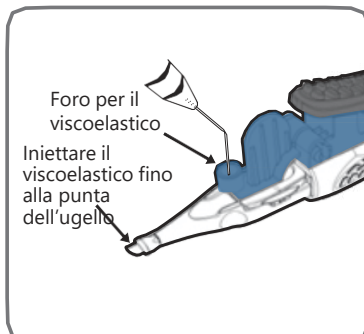


Prima dell'uso, attendere 30 minuti per lasciare che il viscoelastico raggiunga la temperatura presente in sala operatoria<sup>1</sup>




**STEP 2:**  
Rimuovere il  
sistema di  
blocco

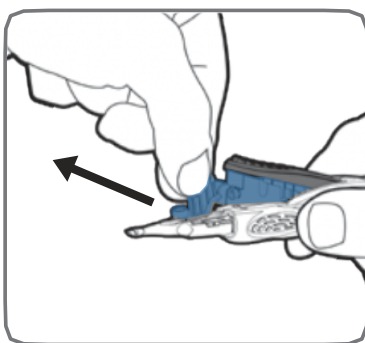

**STEP 3:**  
Far avanzare lo  
stantuffo per  
piegare la IOL

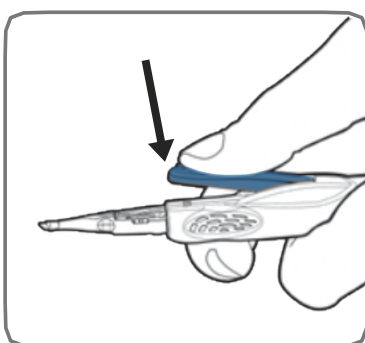

Un "clic" indica che la cartuccia di CO<sub>2</sub> è stata attivata e lo stantuffo è pronto

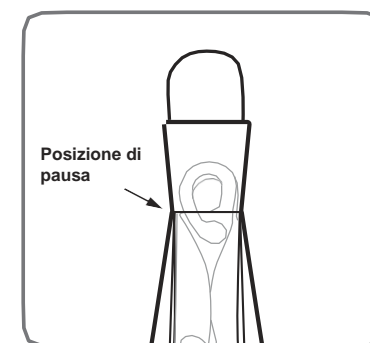

Ispezionare visivamente la lente per determinare la posizione delle anse anteriore e posteriore



**IMPORTANTE:**  
Eseguire l'impianto entro **1 minuto** dopo che la IOL ha raggiunto la posizione di pausa<sup>1</sup>

## Le istruzioni per l'uso di Alcon sono ora disponibili online



Visitare [www.ifu.alcon.com](http://www.ifu.alcon.com)

**1**


Selezionare la regione e/o il Paese

**2**

Eseguire la ricerca per codice prodotto o nome prodotto

**3**

Selezionare la lingua delle IFU (34 lingue disponibili)

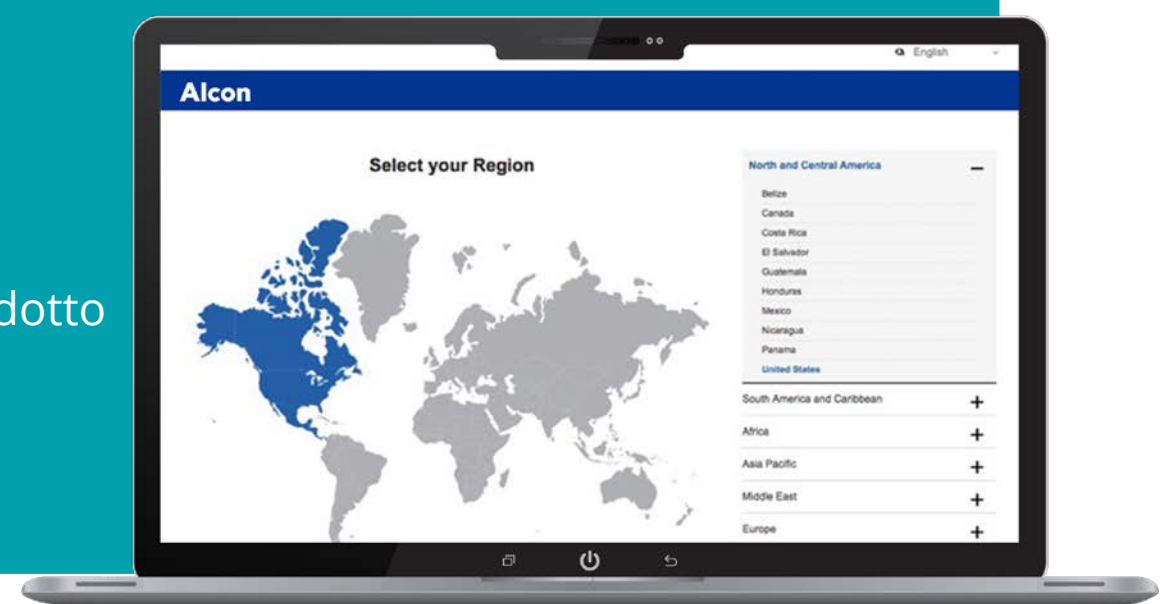

## Come richiedere una copia cartacea delle IFU?



Mandare un'e-mail a [ifu.request@alcon.com](mailto:ifu.request@alcon.com)

1. Inserire il nome prodotto e/o il codice prodotto
2. Stampare le IFU allegate alla risposta ricevuta per e-mail



<sup>\*</sup>Si rimanda alle Istruzioni per l'uso del sistema di rilascio precaricato automatizzato Clareon® AutoNoMe® per le indicazioni complete passo-passo.  
<sup>†</sup>Nei mercati specifici che richiedono IFU cartacee, la confezione della IOL sarà confezionata insieme a una copia cartacea nella lingua locale.  
<sup>1</sup> Istruzioni per l'uso del sistema di rilascio precaricato automatizzato Clareon® AutoNoMe®.